

MONTE- ESCALIER TOURNANT S200



TABLE DES MATIÈRES

1

DESCRIPTION DE L'APPAREIL S200 3

Description 3

Interface utilisateur 3

Alimentation 4

Accoudoirs 4

Assise et repose-pieds: options de repliement 5

Ceinture de sécurité 5

Détection d'obstacles 6

Système de descente de secours 6

Bouton d'appel 6

2

NOTICE D'UTILISATION DU MONTE-ESCALIERS S200 7

3

DÉPANNAGE MONTE-ESCALIER TOURNANT S200 8

L'appareil fonctionne mais ne peut réaliser un trajet complet avec un utilisateur dessus 8


Voyant moteur éteint **Bleu** ou Blanc suivant la date d'installation 8

Voyant moteur allumé mais l'accoudoir clignote **Rouge** avec une alerte sonore 9

Voyant moteur allumé mais l'accoudoir s'allume en **Orange** 10



DESCRIPTION DE L'APPAREIL S200

Description

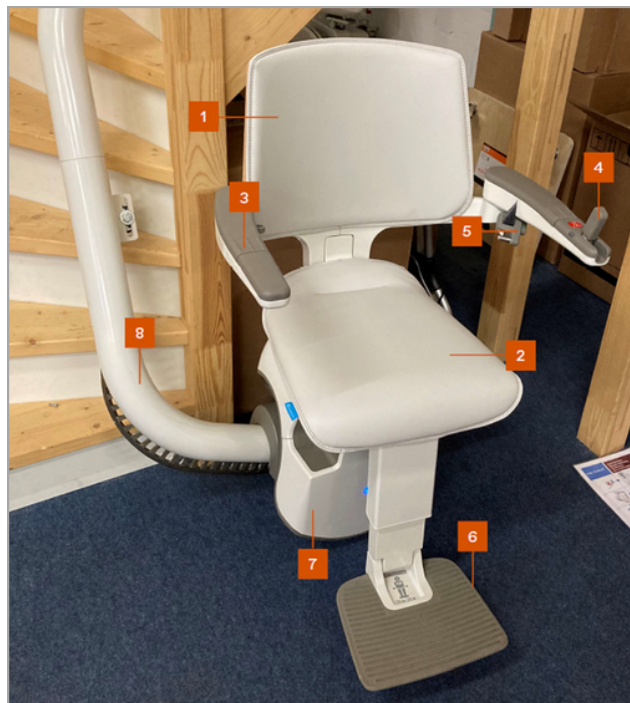

- 1 Dossier – Plusieurs coloris et textures disponibles
- 2 Assise – Plusieurs coloris et textures disponibles
- 3 Accoudoirs ajustables
- 4 Joystick
- 5 Ceinture de sécurité
- 6 Repose-pieds réglable
- 7 Bloc moteur et voyant moteur
- 8 Rail

Interface utilisateur

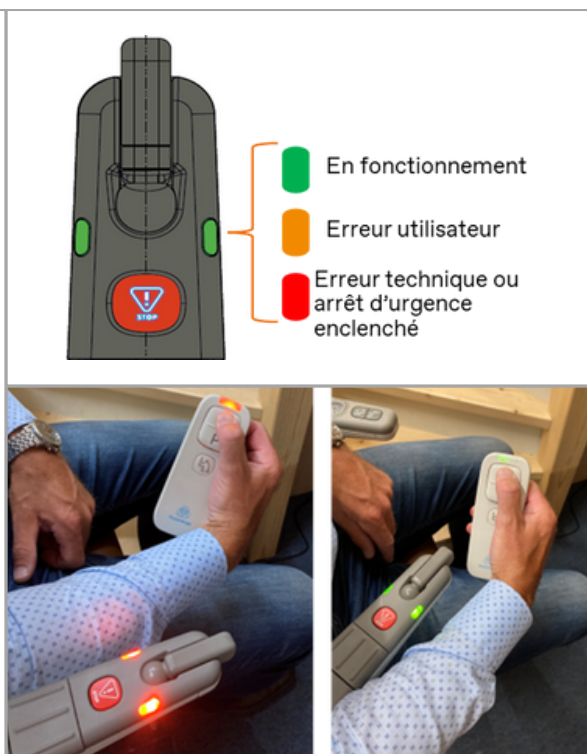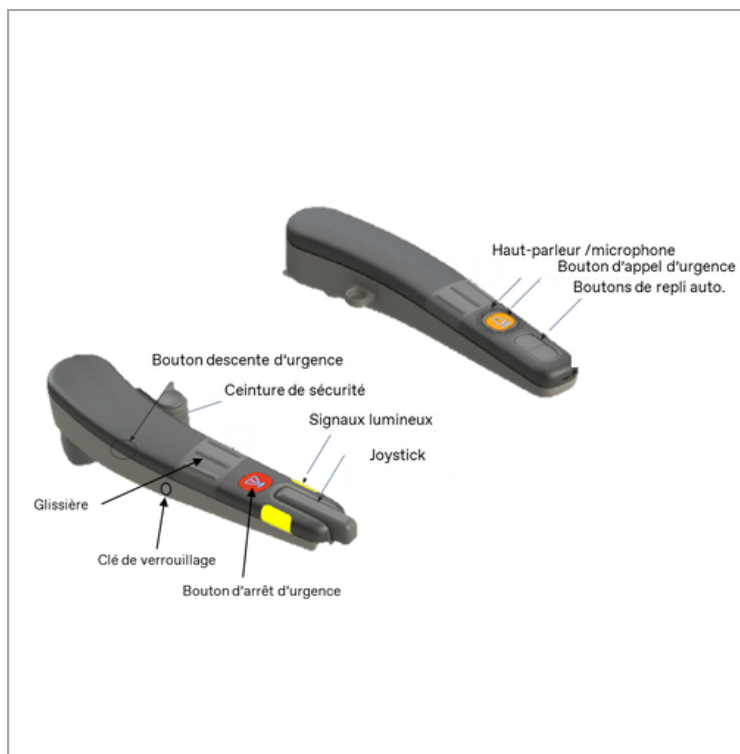

DESCRIPTION DE L'APPAREIL S200

Alimentation



Le monte-escalier est alimenté par des batteries, afin d'assurer une utilisation continue de l'appareil; même en cas de coupure de courant.

Les batteries se rechargent automatiquement lorsque l'appareil est stationné grâce aux points de charge (points d'arrêt prévus pour l'utilisateur, points de parking prévus pour faire stationner le monte-escalier).

Accoudoirs



Les accoudoirs peuvent être facilement ajustés en fonction de la morphologie de l'utilisateur:

- Position 1: Accoudoirs repliés pour limiter l'encombrement
- Position 2: Position permettant aux personnes les moins corpulentes de rapprocher les accoudoirs pour un confort maximal
- Position 3: Position permettant aux personnes corpulentes de bénéficier d'un espace plus important entre les accoudoirs
- Position 4 (option)*: Position "transfert fauteuil roulant" permettant à l'utilisateur d'un fauteuil roulant de faciliter le transfert entre le fauteuil roulant et le monte-escalier



DESCRIPTION DE L'APPAREIL S200

Assise et repose-pieds: options de repliement



Différentes options de repliement sont disponibles:

- Replieement manuel: L'assise et le repose-pieds sont repliés manuellement par l'utilisateur.
- Replieement semi-automatique: L'assise est repliée manuellement par l'utilisateur, le repose-pieds est replié automatiquement (quand l'utilisateur presse le bouton situé sur l'accoudoir).
- Replieement automatique (option indisponible pour l'instant): L'assise et le repose-pieds sont repliés automatiquement (quand l'utilisateur presse le bouton situé sur l'accoudoir).



Ceinture de sécurité




Le monte-escalier est équipé d'une ceinture de sécurité, couplée à un système de détection.

Il ne peut donc être utilisé que quand l'utilisateur a bouclé sa ceinture de sécurité.



DESCRIPTION DE L'APPAREIL S200

Détection d'obstacles

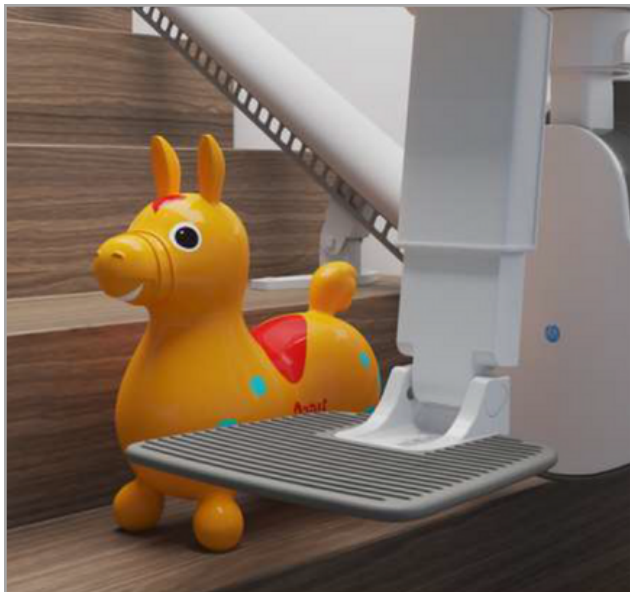

Un système de sécurité déclenche l'arrêt instantané de l'appareil si un obstacle le bloque au niveau du repose-pieds, de l'assise, des accoudoirs, ou du dossier.

Système de descente de secours



Le monte-escalier est équipé d'un système permettant à l'utilisateur de regagner le palier en bas en tout sécurité (vitesse lente) en cas de dysfonctionnement. Une pression maintenue sur le bouton situé sous l'accoudoir suffit à activer ce système de sécurité.

Bouton d'appel




Un bouton d'appel, connecté sur la ligne téléphonique fixe du client, permet d'émettre et de recevoir des appels, et d'échanger en ayant les mains libres avec son interlocuteur:


- 3 numéros de téléphone (choisis par le client) sont enregistrés dans le système au moment de l'installation. Si l'utilisateur exerce un appui prolongé sur le bouton; un appel vers le 1er numéro est lancé. Si appel n'aboutit pas, le système compose le 2nd numéro, puis le 3ème.
- Tous les appels reçus sur la ligne fixe du client peuvent être pris en charge en appuyant sur le bouton situé sur l'accoudoir.




NOTICE D'UTILISATION DU MONTE-ESCALIERS S200

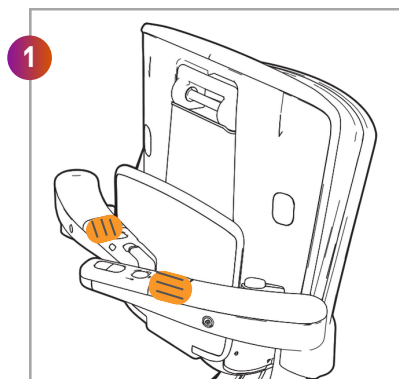


Repérer les glissières

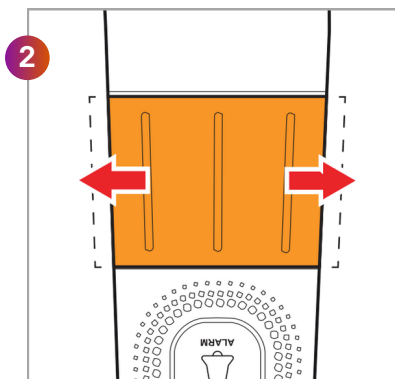

Faire glisser pour déverrouiller les accoudoirs

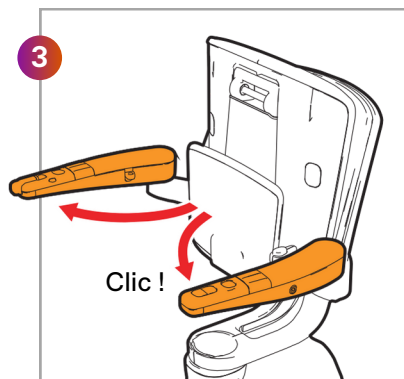


Ouvrir les accoudoirs

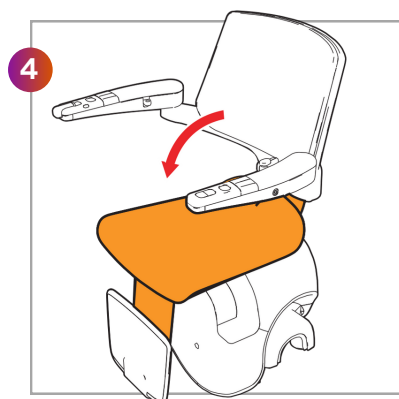


Ouvrir et baisser l'assise




S'installer dans le monte-escaliers

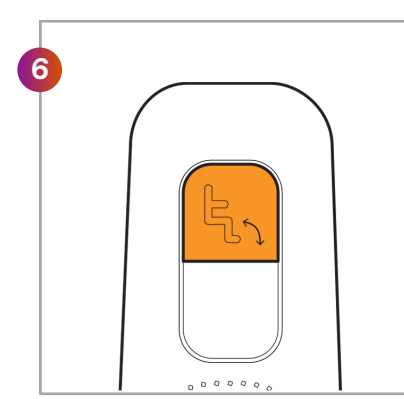


Appuyer sur le bouton d'ouverture du repose-pieds

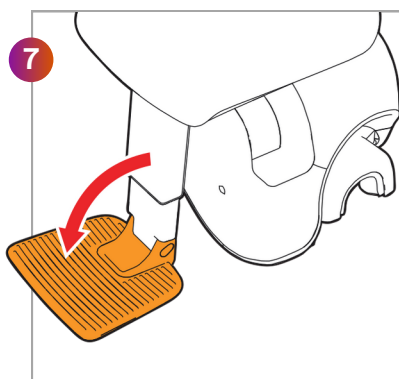


Le repose-pieds se déplie automatiquement

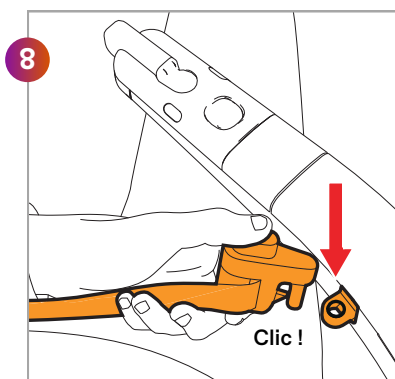


Mettre la ceinture de sécurité

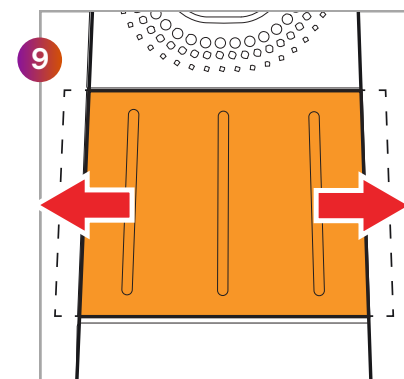

Faire glisser pour déverrouiller les accoudoirs

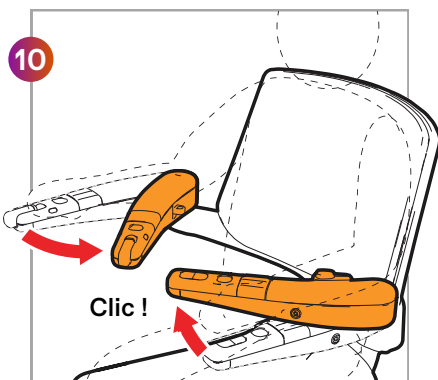

Rabattre les accoudoirs vers soi puis pousser jusqu'à atteindre le cran de blocage

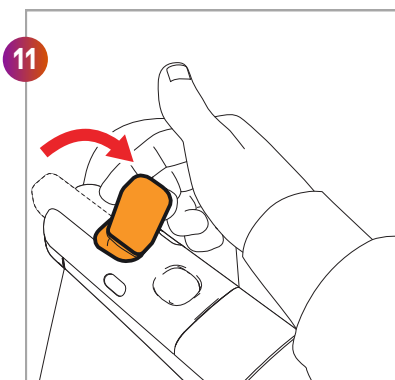

Déplier la manette (joystick)



Pousser et maintenir la manette vers la montée ou la descente

DÉPANNAGE MONTE-ESCALIER TOURNANT S200


Ce manuel propose des solutions pour les problèmes les plus courants liés au monte-escalier Tournant S200. Parcourez-le facilement et résolvez les problèmes rapidement et efficacement !

L'appareil fonctionne mais ne peut réaliser un trajet complet avec un utilisateur dessus

- 1 Laisser recharger l'appareil minimum 4h s'il était mal stationné.
- 2 Si le problème n'est pas résolu, les batteries ne tiennent plus la charge, à remplacer.
- 3 Appelez le service client.

Voyant moteur éteint **Bleu** ou **Blanc** suivant la date d'installation

- 1 Réinitialiser l'appareil.
- 2 Si le problème n'est pas résolu, vérifiez si la prise de courant est branchée et si l'appareil est sur une borne de recharge.
- 3 Si ce n'est pas résolu, appelez le service client.

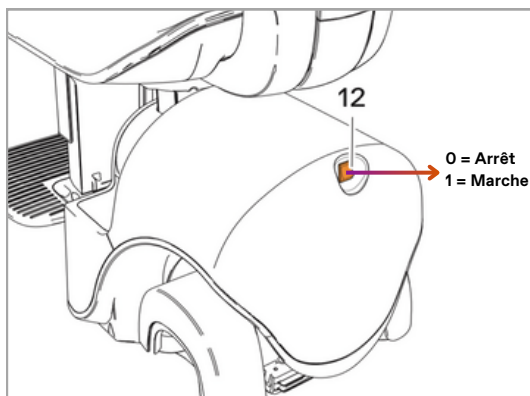

Réinitialiser l'appareil.

Le bouton Marche/Arrêt est situé à l'arrière du moteur, il permet d'éteindre ou d'allumer l'appareil et donc la réinitialisation du moteur.


En fonctionnement normal le moteur doit toujours rester allumé (position 1).

Pour effectuer une réinitialisation à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt il faut dans un premier temps éteindre l'appareil (0), attendre 5 secondes puis le rallumer (1).

DÉPANNAGE MONTE-ESCALIER TOURNANT S200

Voyant moteur allumé mais l'accoudoir clignote **Rouge** avec une alerte sonore

- 1 Désactiver l'arrêt d'urgence.
- 2 Si le problème n'est pas résolu, utiliser le bouton de descente de secours.
- 3 Si le problème n'est pas résolu, réinitialiser l'appareil.
- 4 Si ce n'est pas résolu, appelez le service client.

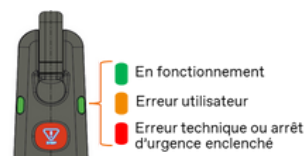


Désactiver l'arrêt d'urgence

Le bouton d'arrêt d'urgence (bouton **stop rouge**) peut avoir été activé par inadvertance lorsque le client s'installe dans l'appareil ou lorsqu'il se relève.

Dans le doute il faut toujours réaliser cette manipulation lorsque la commande clignote rouge rapidement et que l'appareil émet une alerte sonore rapide.

Le bouton d'arrêt d'urgence (**Stop Rouge**) est situé derrière le joystick. Pour le désactiver il faut maintenir appuyé 3 secondes puis relâcher.

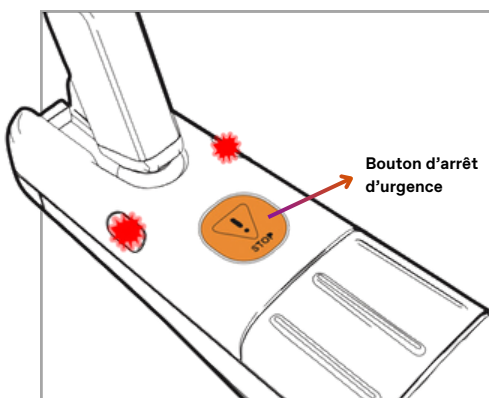

Utiliser le bouton de descente de secours

Le bouton de descente d'urgence permet de redescendre l'appareil jusqu'au point de charge bas. Il n'est à utiliser que si l'appareil est bloqué au cours du trajet, l'appareil ne se déplacera pas s'il est déjà positionné sur un point de charge.

Le bouton de descente d'urgence est situé sous l'accoudoir, du même côté que le joystick. Il est en relief ce qui permet de le trouver même sans le voir. Il faut maintenir le bouton appuyé tout le long de la descente, le fauteuil va redescendre lentement en émettant une sonnerie lente.




Réinitialiser l'appareil.

Le bouton Marche/Arrêt est situé à l'arrière du moteur, il permet d'éteindre ou d'allumer l'appareil et donc la réinitialisation du moteur.



En fonctionnement normal le moteur doit toujours rester allumé (position 1).

Pour effectuer une réinitialisation à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt il faut dans un premier temps éteindre l'appareil (0), attendre 5 secondes puis le rallumer (1).

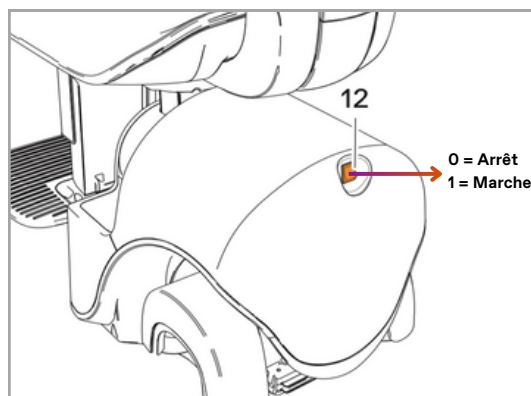

Voyant moteur allumé mais l'accoudoir s'allume en Orange


- 1 Vérifier si vous avez correctement attaché la ceinture de sécurité.
- 2 Si le problème n'est pas résolu, vérifier la position et le bon verrouillage des accoudoirs.
- 3 Si ce n'est pas résolu, appelez le service client.

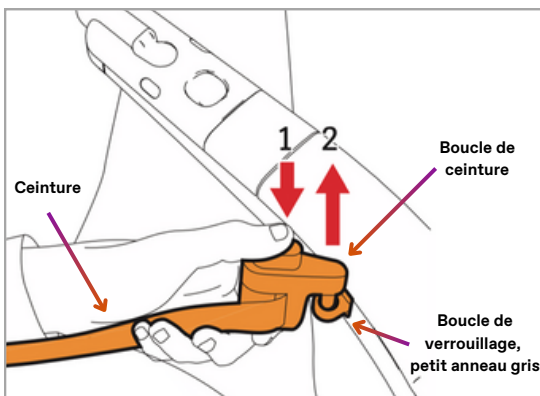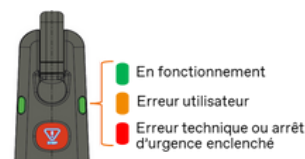


Ceinture de Sécurité

Le voyant d'accoudoir est **orange** si vous essayez d'utiliser l'appareil à partir de la commande d'accoudoir et que la ceinture de sécurité et/ou les accoudoirs ne sont pas correctement positionnés et verrouillés.


Pour mettre la ceinture, vous devez mettre la boucle de ceinture dans la boucle de verrouillage.
Pour retirer la ceinture, vous devez dans un premier temps appuyer sur le bouton au-dessus de la boucle de ceinture (1), puis lever la boucle de ceinture (2).

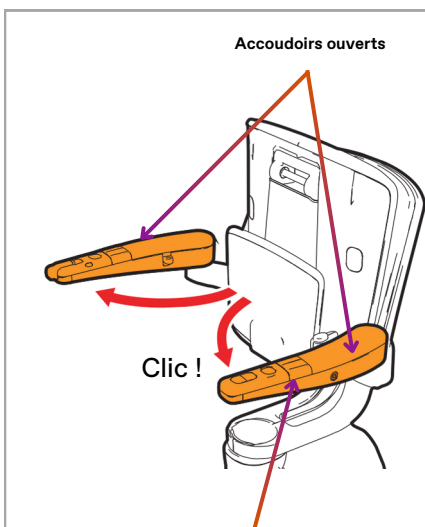

Mécanisme de déverrouillage
Glisser la partie mobile grise vers la droite ou la gauche pour déverrouiller les accoudoirs

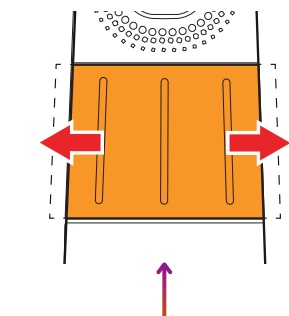

Mécanisme de déverrouillage
Glisser la partie mobile grise vers la droite ou la gauche pour déverrouiller les accoudoirs

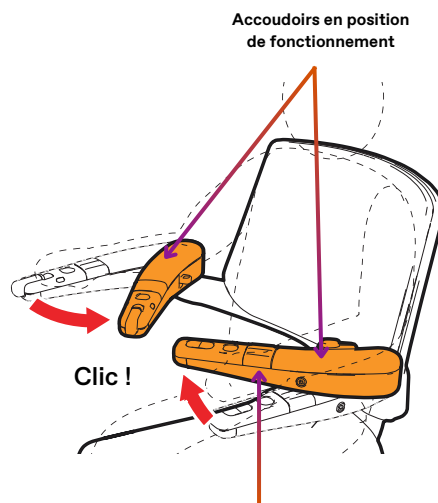

Mécanisme de déverrouillage
Glisser la partie mobile grise vers la droite ou la gauche pour déverrouiller les accoudoirs

Positionnement et verrouillage des accoudoirs

Le voyant d'accoudoir est **orange** si vous essayez d'utiliser l'appareil à partir de la commande d'accoudoir et que la ceinture de sécurité et/ou les accoudoirs ne sont pas correctement positionnés et verrouillés.

Avez-vous correctement positionné les accoudoirs en position de fonctionnement ?

Les accoudoirs doivent se verrouiller tout seuls, si vous arrivez à déplacer les accoudoirs sans manipuler le mécanisme de déverrouillage, c'est que les accoudoirs ne sont pas correctement verrouillés et l'appareil ne partira pas (voyant **orange**).

TKE